

POWER[®] **breathe** **Shaker[®]**
DELUXE

Naudotojo
vadovas



Kas yra „Shaker Deluxe“ prietaisas?

„Shaker Deluxe“ yra paprastas naudoti kvépavimo prietaisas, skirtas mobilizuoti plaučių sekretui, pvz., gleivėms ir skrepliams. „Shaker Deluxe“ sukurtas naudojant naujausias dizaino technologijas. Prietaisas ergonomiškas ir paprastas naudoti, jo nereikia papildomai surinkti.

Kaip veikia „Shaker Deluxe“ prietaisas?

„Shaker Deluxe“ korpuso viduje yra svertinis rutuliukas. Kvėpuojant į „Shaker Deluxe“ prietaisą, rutuliukas yra pakeliamas, bet paskui nusileidžia veikiamas savo paties svorio. Šis pakilimas ir nusileidimas vyksta nepaprastai greitai, todėl naudotojas jaučia vibraciją. Ši vibracija kartu su nedideliu pasipriešinimu, kurį sukuria kvépavimas į rutuliuką, teikia įvairios naudos.

Dėl oro slėgio pokyčių smulkesni kvépavimo takai yra skatinami atsiverti, todėl plaučiai yra labiau įdarbinami, didėja jų efektyvumas. Vibracija suskystina arba išjudina gleives, o padidėjęs oro srautas padaeda išstumti šias gleives į stambesnius kvépavimo takus, iš kurių jas galima pašalinti nesmarkiai atskoséjant.

„Shaker Deluxe“ prietaisą galima naudoti bet kur, tad jis paprastai ir patogiai padės atskiratyti gleivių pertekliaus ir su juo susijusių problemų. „Shaker Deluxe“ prietaisą galima naudoti sergant létinémis ligomis, pvz., létine obstrukcine plaučių liga (LOPL), astma ar emfizema, arba esant umeims susirgimams, pvz., krūtininiam kosuliuui, gripui ar bronchitui.

Išvalant kvépavimo takus, sumažinama tikimybė, kad išsvystys plaučių infekcija ar plaučiai bus pažeisti. Be to, pagerėja plaučių funkcionavimas, todėl sumažėja dusulys ir nuovargis.

Kaip naudoti „Shaker Deluxe“ prietaisa

Sédēdami arba gulėdami apgaubkite kandiklį lūpomis taip, kad neliktu jokių tarpu. Įsitikinkite, kad kandiklį laikote horizontalioje padėtyje.

Įkvépkite per nosį ir iškvépkite per burną.

Laikykite prietaisą taip, kad jis plaučiuose sukeltų kuo didesnę vibraciją, kurią turėtumėte lengvai pajusti iškvėpimo metu uždėdami ranką sau ant krūtinės.

Reguliariai arba pagal poreikį švelniai atsikoskite ir išstumkite susikaupusį sekretą.

Atsargumo priemonės

- „Shaker Deluxe“ prietaisas yra skirtas tik vienam naudotojui – higienos sumetimais juo neturėtų naudotis kiti naudotojai.
- „Shaker Deluxe“ prietaiso negalima naudoti asmenims, kuriems pasireiškia pneumotoraksas arba hemoptozė.
- Asmenys, sergantys sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, „Shaker Deluxe“ prietaisą turėtų naudoti tik gydytojo nurodymu.
- Nekeiskite jokių jums išrašytų vaistų ar paskirtos gydymo programos, nepasitarę su gydytoju.
- Jei prietaisą naudoja jaunesni nei 16 metų amžiaus vaikai gali reikėti suaugusiųjų priežiūros.
- Jei naudojant „Shaker Deluxe“ prietaisą ima svaigtį galva, nustokite daryti pratimą ir ramiai kvėpuokite per nosį, kol šis jausmas praeis. Jei galva svaigsta kiekvieną kartą naudojant prietaisą, kas trečią iškvėpimą padarykite be „Shaker Deluxe“. Jei svaigulys nepraeina arba naudojant „Shaker Deluxe“ prietaisą išskyla kitų problemų, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.
- „Shaker Deluxe“ prietaisas yra skirtas plaučių sekretui mobilizuoti. Jokia kita paskirtis nėra numatyta ar numanoma. Šis gaminys nėra skirtas diagnozuoti, gydysi ar užkirsti kelią kokiai nors ligai.
- Reikėtų naudoti tik prietaisus, parduodamus pakuočėje su apsauginiu lipduku.
- Laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginės šilumos šaltinių ar saulės spindulių.
- Šis gaminys yra užsandarintas higienos sumetimais, todėl, jeigu apsauginis lipdukas pažeistas, jo grąžinti negalima.


Techninės specifikacijos

Korpusas, kūgis, dangtelis ir kandiklis pagaminti iš lieto poliamido.

Svertinis rutuliukas pagamintas iš nikeliu dengto plieno.

Priežiūra ir valymas

Naudojant „Shaker Deluxe“ į prietaisą gali patekti seilių, todėl rekomenduojame ji po naudojimo išvalyti. Nuimkite kandiklį, atsukite gaubtą ir išimkite rutuliuką bei vidinį kūgi. Visas dalis nuplaukite muiliuotu vandeniu, nuskalaukite švariu vandeniu, gerai išdžiovinkite ir vėl surinkite. Kartą per savaitę rekomenduojame prietaisą išvalyti naudojant patvirtintas valymo tabletės.

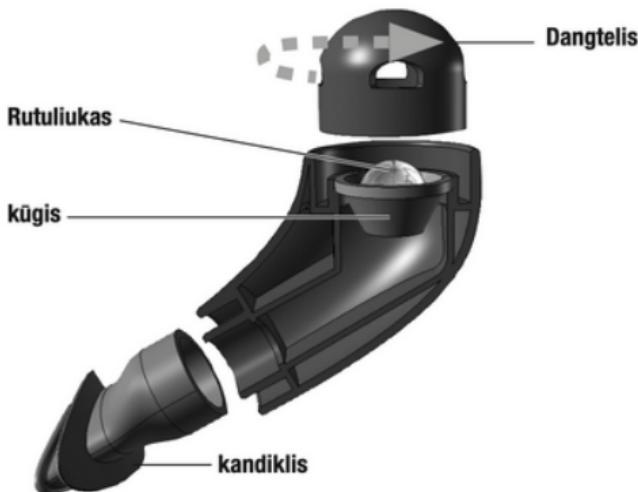

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

„Shaker Deluxe“ prietaisas – ne žaislas. Šis gaminys skirtas naudoti tik kvėpavimo pratimams atlikti. Nerekomenduojama naudoti jokiems kitiems tikslams.

Šiame vadove pateikta medžiaga skirta tik informuoti. „POWERbreathe International Ltd“ neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl šio vadovo ar čia aprašytų gaminių. „POWERbreathe International Ltd“ neprisiima atsakomybės už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, pasekminius ar specialiuosius nuostolius, kurie atsiranda dėl netinkamo šios medžiagos ar joje aprašytų gaminių naudojimo arba nukrypimo nuo numatyto naudojimo arba yra su jais susiję.

„Shaker Deluxe“ yra patentuotas gaminys, kuriam taikoma projektavimo apsauga. Visos teisės saugomos.

Gamintojui vykdant nuolatinio tobulinimo programą, specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

„POWERbreathe“ logotipas yra registruotas „POWERbreathe Holdings Ltd“ prekės ženklas. Visi „POWERbreathe“ gaminijų pavadinimai yra „POWERbreathe Holdings Ltd“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Išskyrus klaidas ir praleidimus © 2023 m. 11 mén.

Visa informacija yra teisinga teikimo spausdinti metu.

Ribotoji 12 mėnesių gamintojo garantija*

*3 mėnesių, jei prietaisas naudojamas profesionaliai / įstaigoje / komerciniais tikslais.

„Shaker Deluxe“ prietaisas gaminamas išskirtinai „Powerbreathe International Ltd“ užsakymu, siekiant jį platinti užsienio šalyse. Ši garantija pirkėjui suteikia tam tikras juridines teises. Pirkėjas gali turėti ir kitų įstatymuose numatytyų teisių. Pirminiam pirkėjui, kurio vardas ir pavardė yra tinkamai užregistruoti bendrovėje „Powerbreathe International Ltd“, bendrovė garantuoja, kad jos parduodamas gaminys neturi medžiagų ir gamybos defektų.

„POWERbreathe International Ltd“ įsipareigojimų apimtis pagal šią garantiją yra tik tos (tu)

įrenginio dalies (-iu), kurią (-ias) patikrinus bus nustatoma medžiagų ar gamybos defektų, taisymas ir pakeitimasis. Ši garantija netaikoma netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo ar nelaimingų atsitikimų atvejais, aplaidaus atsargumo priemonių laikymosi atvejais, netinkamos priežiūros ar naudojimo komerciniais tikslais atvejais ar kai deklas yra įskilęs arba sulūžęs. Šiuo vienų metų garantiniu laikotarpiu gaminys bus arba taisomas, arba pakeičiamas nauju (mūsų pasirinkimu, nemokamai). Garantija netaikoma nuostoliams ar pasekminiams nuostoliams, atsiradusiems naudojant gaminį paslaugoms, kurioms „POWERbreathe International Ltd.“ nedavė leidimo.

Čia pateiktos garantijos aiškiai galioja vietoje bet kokių kitų garantijų, išskaitant numanomas tinkamumo parduoti ir (arba) tinkamumo konkretiam tikslui garantijas.

Jei norite aktyvinti garantiją, nepamirškite užregistruoti „Shaker Deluxe“ prietaiso įsigijimo svetainėje www.powerbreathe.com

Daugiau informacijos rasite svetainėje www.powerbreathe.com

Telefonas: +44 1926 816100

Kontaktinė informacija

Pagrindinė buveinė:

POWERbreathe International Ltd

Northfield Road, Southam, Warwickshire

CV47 0FG, England, UK

www.powerbreathe.com

Telefonas: +44 1926 816100

Pagaminta Brazilijoje Išskirtinai „

POWERbreathe® International Ltd“ užsakymu

Šiam gaminui taikoma patento ir projektavimo autorių teisių apsauga ©



NCS Industria e Comercio Ltda.

Rua Aeroporto, 192 - Chacaras Marco

Barueri - SP - Brasil - CEP 06419-260

[EC REP] HaB GmbH,

Porschestra. 4,

D-21423 Winsen an der Luhe,

Deutschland.

